



Einarbeitung der Saugerplatte.

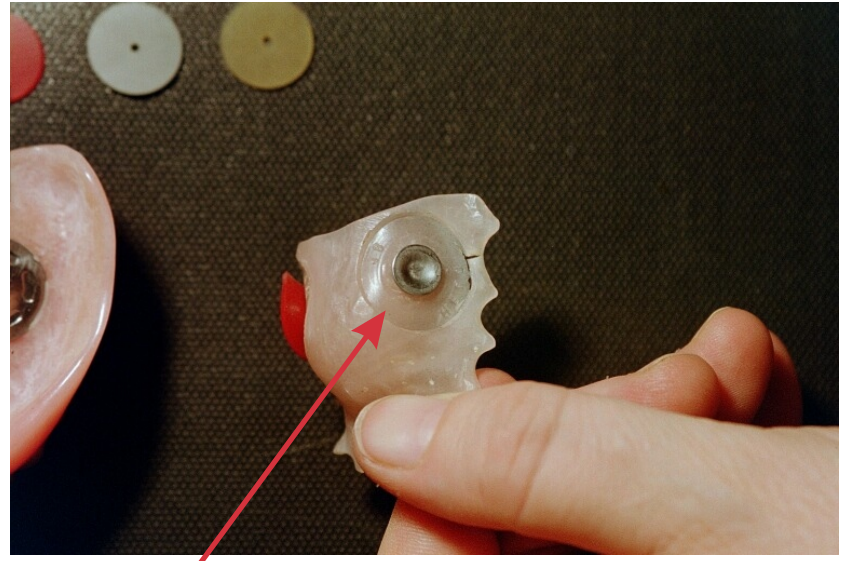

Modell isolieren. Sauger wird im Gaumendach mit glatter Fläche auf Gipsmodell angedrückt und festgeklebt (Sauger und Kunststoff müssen eine Fläche bilden). Nach Pressen der Prothese kann das Metallplättchen mit spitzem Instrument entfernt werden. Saugerknopf liegt nun frei. Über den Saugerknopf kann nun der Saugergummi gezogen werden.

Aufziehen der Gummischeiben auf den Saugerknopf

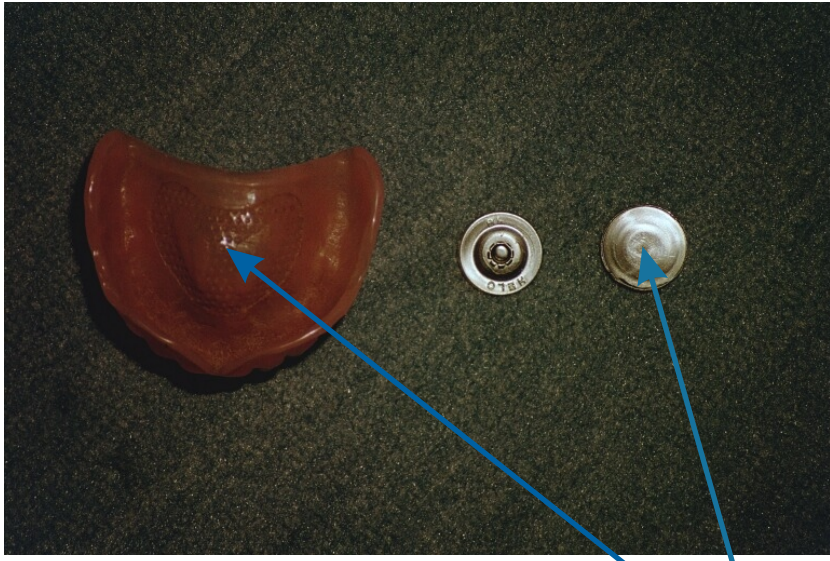